



MASKA OCHRONNA KN95 FFP2 CERTYFIKAT CE

STARA CENA: ~~3,90 PLN~~

NOWA CENA: 3,10 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Producent: BEAUTY SYSTEM

Numer katalogowy: IP-KN95

OPIS PRZEDMIOTU

Czterowarstwowa maseczka ochronna filtrująca w kategorii FFP2

Maska spełniająca normę EN149:2001+A1:2009 co zapewnia bardzo wysoką wydajnością filtracji > 95%

Te maseczki z powodzeniem używane są przez personel medyczny w warunkach dużego zagrożenia infekcją

Maska dzięki specjalnemu połączeniu atestowanych materiałów sprawia, że jest przyjazna dla skóry i jednocześnie zapewnia wysoki komfort oddychania.

Maska dopasowuje się do kształtu twarzy i jest bardzo wygodna w noszeniu.

"Nie poci się". Nie uciska uszu nawet przy dłuższym noszeniu.

Produkt rozmiarowo uniwersalny (dla osób dorosłych oraz starszych dzieci).

SPECYFIKACJA:

Typ: maseczka do ochrony osobistej twarzy

Klasyfikacja: filtrująca typ FFP2

Certyfikaty i normy: CE, EN149:2001+A1:2009 - zgodność ze standardami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia.

Podstawowe cechy produktu:

Pełna ochrona ust i nosa
Bardzo wygodna w noszeniu
Hypoalergiczna
Wielokrotnego użytku
Wszyta blaszka usztywniająca nosek
Kolor: biały (jak na zdjęciu)
Rozmiar: uniwersalny, unisex
Pakowane w woreczki foliowe.

Sposoby dezynfekcji masek ochronnych:

- umieścić maskę w piekarniku nagrzanym do 70 stopni z włączonym termoobiegiem na 30 minut; zaleca się położyć maskę w naczyniu żaroodpornym lub na folii aluminiowej;
- wystawić maskę na działanie pary wodnej z gotującej się wody na czas nie dłuższy niż 10 minut;
- włożyć maskę do słoika i gotować w garnku z wodą przez 10-20 minut.

Uwaga:

Moczenie maski w wysokoprocentowym alkoholu lub dezynfekcja produktami na bazie chloru obniża zdolność filtracji, przez co maska może nie spełniać swojej funkcji.

Nie poleca się również dezynfekowania maski w mikrofalówce, ponieważ niektóre materiały, z których wykonana jest maska, mogą ulec zniszczeniu.

*maseczka może się delikatnie różnić od prezentowanej na zdjęciu.